


Podo Box™



MediRoyal har tillsammans med Ortopedingenjör Lars Eghamn utvecklat denna kompakta och funktionella spegellåda, PodoBox™.

Spegellådan är ett utmärkt hjälpmedel vid diagnostisering av besvär från nedre extremitet. Det går enkelt att se belastningen på fotvalven och varus- eller valgusställning av hälen. Med spegellådan kan man också göra enklare statistiska analyser av fotledens belastning. PodoBox™ är en kompakt

spegellåda med mycket låg höjd vilket gör det enkelt för patienter att kliva upp och ned. I botten på lådan sitter spegeln vilket gör det enkelt för både behandlare och patient att se belastningen. Många spegellådor har dålig belysning. Därför har PodoBox™ två 8W lysrör monterade nedtill för att ge maximal belysning. Glasskivan är tillverkat i 10 mm härdat glas vilket gör det både hållfast och tåligt mot repor. Undertill har PodoBox™ ställbara fötter för att kunna kompensera för ojämnt underlag. ■

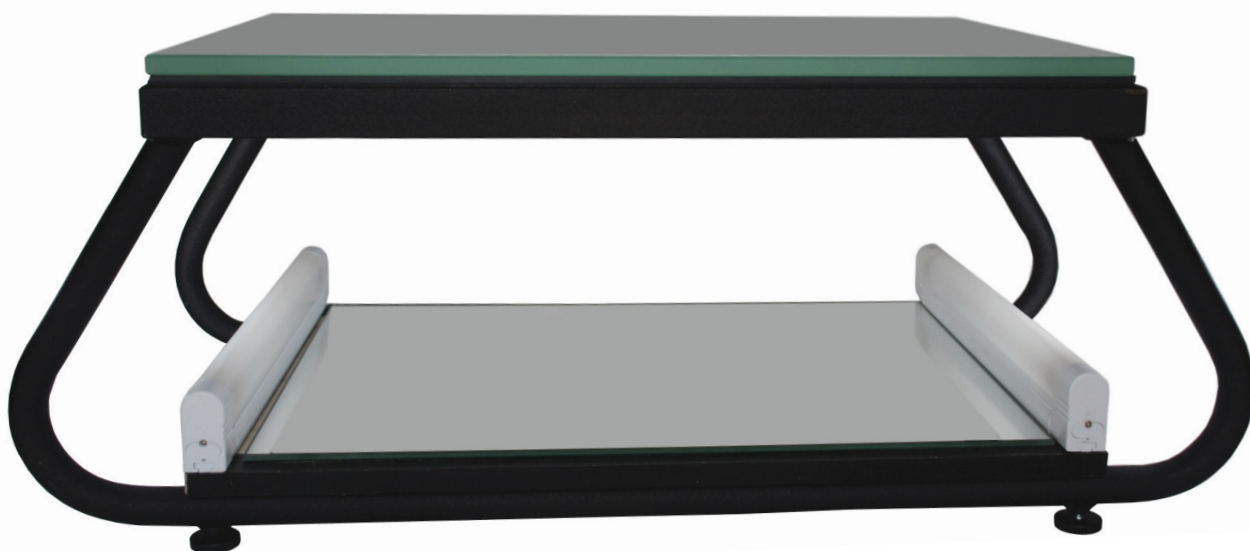

MR 1990

PodoBox™

Höjd: 25 cm

Längd: 64 cm

Bredd: 35,5 cm

Vikt: 10 kg

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se