

Hjälp för hand & finger



mediroyal 

Living Proof

mediroyal.se



502

X-Hard

Coll-Extensionsfjäder-PIP, 502


Denna fingerfjäder ger större hjälp till sträckning och balans åt fingret genom den på båda sidor placerade rullfjäders. Ett bågformat stöd proximalt och distalt om leden fördelar trycket jämnt över hela fingret. Justerbar med hjälp av ett distalt band för extension. Denna fingerfjäder har en kraftigare fjäderspänning i extenderat läge än artikelnummer 501 och 602. Kraften på leden är ca 12,4 N vid full extension. **INDIKATIONER:** Flexionkontraktur i PIP-led.

502		Coll-Extensionsfjäder-PIP, X-hard				
Storlek	A	B	C	D		
Längd	64	70	76	83		

Längd i mm. Avståndet mäts från det distala böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. Fingret ska vara sträckt vid mätningen.



CE

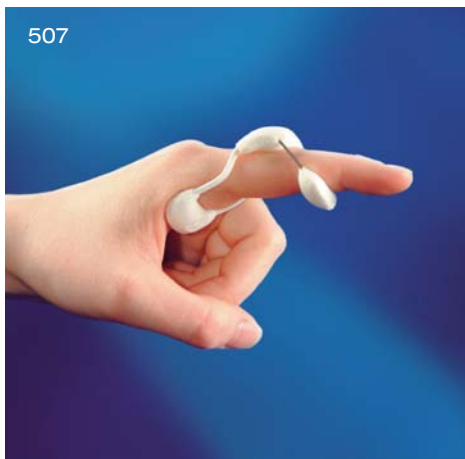

507

Hard

Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, 507

Denna fingerfjäder utverkar mer kraft än Art. 501. Idealisk att använda för att återfå de sista graderna till en PIP-extension. Genom att försiktigt bända den böjbara ståltråden kan spänningen justeras i fjädern. Den breda dorsala plattan på fjädern fördelar trycket jämnt över en stor yta. Lätt sträckning på MCP-led. Kraften på leden är ca 3,4 N vid 15° flexion. **INDIKATIONER:** Ökande ledstramhet, ROM begränsad och flexionskontraktur.

507		Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, Hard				
Storlek	AA	A	B	C	D	
Längd	57	67	76	86	95	
Bredd	22	22	25	29	29	

Längd & bredd i mm. Avståndet mäts från det distala böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. Fingret ska vara sträckt vid mätningen.



CE



501

Medium

Extensionsfjäder-PIP lång, 501

Modellen sträcker i PIP-led och har en mild extensionseffekt på MCP-leden. Lämnar DIP-leden fri. Fingerfjäders åstadkommer en jämn tryckfördelning över PIP-leden genom den polstrade dorsala plattan. Kraften på leden är ca 2,3 N vid 15° flexion. **INDIKATIONER:** Sträckdefekt i PIP-led på 45° eller mindre, korrigerig vid Boutonniere-deformitet och PIP-leds stramhet.

501		Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, Hard				
Storlek	AA	A	B	C	D	
Längd	57	67	76	89	102	
Bredd	22	22	25	29	29	

Längd & bredd i mm. Avståndet mäts från det distala böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. Fingret ska vara sträckt vid mätningen.



CE

Medium


Extensionsfjäder-PIP kort, 504

Kortare modell jämfört med Art. 501. Påverkar inte MCP-leden men sträcker i PIP-leden. Mindre storlekar kan användas för DIP-leden. Fjäderspänningen kan enkelt justeras vid svullnad. Kraften på leden är ca 2,3 N vid 15 gr flexion. **INDIKATIONER:** Sträckeffect i PIP-led för att öka extensionen. För minskning av PIP-ledstramhet och korrigerande av Bouttonnieredeformitet.

504 Extensionsfjäder-PIP kort, Medium

Storlek	AA	A	B	C	D
Längd	44	48	51	57	67
Bredd	22	22	25	29	29

Längd & bredd i mm. Mät avståndet från den volara ytan av fingret. Från fingerbasen av MCP-leden.

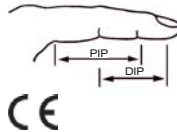

Soft


Extensionsfjäder-PIP, 602

Fingerfjäderspänningen åstadkommer en smidig sträckning av leden fullt ut. Låg fjäderspänning för att reducera PIP, DIP eller IP-leds flexionskontraktur. Lämplig att bära under längre tid på den låga fjäderspänningen. Kan också användas på angränsande finger. Kraften på leden är ca 1,1N vid 15° flexion. **INDIKATIONER:** Vid krosskador, brännskador, Bouttonnieredeformitet och begynnande kontraktur i PIP-led.

602 Extensionsfjäder-PIP, Soft

Storlek	AA	A	B	C	D
Längd	44	48	51	57	67
Bredd	22	22	25	29	29

Längd & bredd i mm. Mät avståndet från den volara ytan av fingret från fingerbasen av MCP-leden.

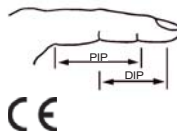

Medium


Coil Flexionsfjäder-PIP, 503

Rullfjädrarnas placering lateralt mot PIP-leden åstadkommer flexion i mellanfalangen. Den dorsala plattan fördelar trycket behagligt och det proximala bandet tillåter justerbar spänning. Den distalt placerade plattan tillåter rörlighet. Fingerfjäderspänningen kan flekteras en mjuk led till 80°. Kraften på leden är ca 2,3 N. **INDIKATIONER:** Extensionskontraktur i PIP-led och stram mjukdelsvävnad

503 Coil Flexionsfjäder-PIP, Medium

Storlek	A	B	C	D
Längd	64	70	76	83

Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av fingret. Från fingerbas till DIP-led som indikeras på illustrationen.

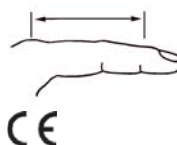




Soft

Flexionsfjäder lätt, 601

Åstadkommer flexion i PIP- eller DIP-leden. Kan med fördel bäras på intilliggande finger utan att hindra i dagliga aktiviteter. Den dynamiska fjädern kan åstadkomma en successiv böjning av PIP-leden till ca 80° flexion genom ett mildt konstant tryck av fjädern. Kraften på leden är ca 1,1 N. **INDIKATIONER:** Att återställa PIP-ledsflexion vid kontraktur, reducera svanhals-deformitet och vid krosskador.

601	Flexionsfjäder lätt, Soft				
Storlek	AA	A	B	C	D
Längd	32	38	44	57	70

Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av fingret. Från fingerbas av MCP-led till DIP-led som indikeras på illustrationen.

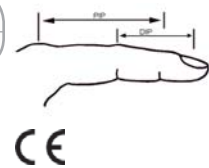

Tvillingförband, 804

Ett tvillingförband används så att ett starkare finger assisterar ett svagare. Mjukt Duraval-material med kardborrband. Kan klippas för att passa individuella behov. **INDIKATIONER:** Fraktur på falangen, ligamentskada och andra skador där tvillingförband passar.

804	Tvillingförband
Universal storlek. 6 stycken förband/förpackning.	



Tvillingförband, 1005-13 1007-26

Ett tvättbart antiglidskumfodrat, ventilerande material som erbjuder en enastående komfort genom att materialet ligger tätt intill huden vilket hindrar glidning. Latexfritt. Finns i 13 mm och 26 mm bredd i en längd. Idealiskt för användning under arbete, fritids- och sportaktiviteter och långtidsanvändning. **INDIKATIONER:** Lätta distorsioner, öm, svullen led med partiell/total ligamentskada i PIP-leden. Lätta stabila frakturluxationer, behandling upp till sex veckor.

1005-13 1007-26	Tvillingförband
1005-13/005	Tvillingförband 13 mm, 5 st.
1005-13/025	Tvillingförband 13 mm, 25 st
1005-13/050	Tvillingförband 13 mm, 50 st
1005-13/100	Tvillingförband 13 mm, 100 st
1007-26/005	Tvillingförband 26 mm, 5 st
1007-26/025	Tvillingförband 26 mm, 25 st
1007-26/050	Tvillingförband 26 mm, 50 st
1007-26/100	Tvillingförband 26 mm, 100 st


För mer information se separat produktblad.



Flexion/Extensionsdrag finger, 1006

Det mest komfortabla fingerdrag att använda sig av för att åstadkomma flexion/extension av ett stelt finger. Trä ett gummiband/nylontråd genom ringen längst fram på draget, koppla det mot en statisk ortos till ett sk. dynamiskt drag. Ett ventilerande material som erbjuder en enastående komfort genom att materialet ligger tätt intill huden vilket hindrar glidning. Latexfritt. **INDIKATIONER:** Post.op vid begynnande extensionsdefekt, adheranser, dålig senglidning i ett finger.

1006	Flexion/Extensionsdrag	
Storlek	Finns i en storlek	
Färg	Svart	
1006-005 Förpackning med 5 drag 1006-025 Förpackning med 25 drag		

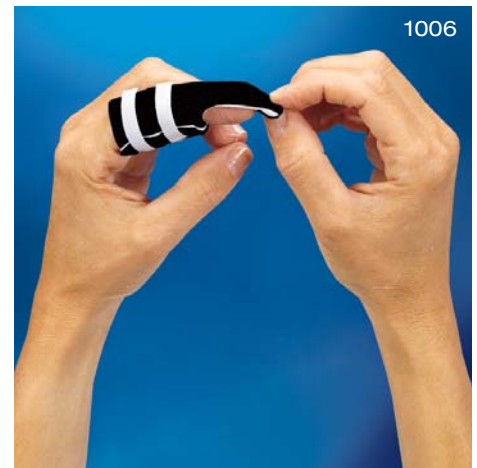

1006

Flexionsband, 1004

Ett justerbart flexionsband som ger en jämn tryckfördelning över led/leder för att åstadkomma full flexion av PIP och DIP- flexion av ett finger och/eller innan träning av finger för töjning vid intra-extraartikulärt hinder. Ett latexfritt antiglidskumfodrat material. **INDIKATIONER:** Vid stram mjukdelsvävnad. Vid begynnande Extensionskontraktur.

1004	Flexionsband	
Storlek	Finns i en storlek	
Färg	Svart	
1004-005 Förpackning med 5 band 1004-025 Förpackning med 25 band		




1004

Fingerhylsa, 670

Dynamiskt och/eller statiskt stöd i en och samma ortos med justerbar kompressionsmöjlighet vid ett svullet finger med hjälp av en snöranordning. Volart på fingerhylsan finns en ficka som används för ett dynamiskt och/eller ställbart statiskt extensionsstöd i plast/metall. Används dag/natttid till exempel vid extensionsdefekt. Ett mjukt lycramaterial ger bra stabilitet åt led/ledband men bibehåller rörligheten vid aktivitet. **INDIKATIONER:** Vid post-fingerfraktur, stukningar, ligament och senskador samt Boutonniere deformitet och droppfinger.

670	Fingerhylsa				
Storlek	AA	A	B	C	D
Längd	32	51	64	76	89
Längd i mm. Mät avståndet som indikeras på illustrationen till höger.					

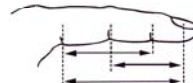

670




Oval-8 fingerringar, 1008

Stabiliserar-avlastar och/eller korrigerar fingrarnas IP-leder för en förbättrad handfunktion - dels genom sin unika banddesign och dels med både hel och halvringstorlek i en och samma ring beroende på vilken sidag av Oval-8-ringen som först placeras på fingret. Tillverkad av 1,6 mm polypropylenplast. Smutsavvisande och bekväm att bära vid alla temperaturer. Tillgänglig i storlekar motsvarande standardstorlekar hos vanliga ringar. Säljes separat och/eller i en box om 42 st. Ändring av ortosens vinkel justeras enkelt med varmluftspistol.

INDIKATIONER: Korrigera svanhals-, boutonnière- och malletfingrar, reducerar lateraldeviation av fingret och avlastar vid triggerfingrar.

1008	Oval-8 Fingerringar
Storlek 3-15	
För mer information se separat produktblad.	
1008-S	Oval-8 Fingerringar Storleksset
Innehåller en av varje av de 13 storlekarna på en nyckelring. Samt standardmått som guldsmeder använder. Totalt 29 plastringar.	
För mer information se separat produktblad.	
1008-K	Oval-8 Fingerringar Samlingsbox
Innehåller 42 st ringar i storlekarna 3-15. Ett mått på standardstorlekar, ficklampspenna & instruktionshäfte medföljer den praktiska samlingsboxen.	
För mer information se separat produktblad.	

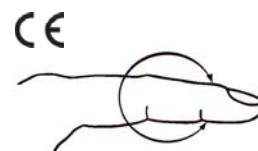

Open-Air STAX fingerskena startset, 635

Set med 40 stycken STAX-ortoser och 50 stycken band. Fingertoppskena som skyddar distala falangen och extenderar i DIP-leden. Tillverkad i genomskinlig plast, klar, plast. Perforerad design minskar hudpåverkan. Öppen topp möjliggör kontroll av fingertopp och nagelband. Självhäftande kardborrband säkrar ortosen på fingret. Bandet appliceras genom spåret i ortosen.

635	Open-Air STAX fingerskena startset
Lådan innehåller:	
0, 7	2 stycken
1, 6	3 stycken
2, 3, 3.5, 4, 5, 5.5,	5 stycken av varje
50 stycken kardborrband.	



Set av dynamiska fingerfjädrar, 6000

Komplett sortiment av 29 stycken dynamiska fingerfjädrar och fingerhylsor. Levereras i en praktisk låda med handtag för enkel lagerhållning och utprovning.

6000 Set av dynamiska fingerfjädrar

Lådan innehåller:

En av varje storlek
A, B, C, Artikelnummer: 502, 503, 504, 508, 601 och 602.

En av varje storlek
A, B, C, D, Artikelnummer: 501, 507.

En av varje modell
670ABLK, 670BBLK, 670CBLK



Dynamisk Handledsstabiliserande ortos, 709

Handledens extensionskraft justeras genom att försiktigt bända den laterala fjädern i denna ortos. Kraften på handledsextensionens rundstav är avpassad när handleden är flekterad i neutral position.

INDIKATIONER: Post-op handledsfraktur, radialispareas samt vid sen-, kross- och klämskador.

709 Dynamisk Handledsstabiliserande ortos, Hö/vä

Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large
Bredd	56-68	72-81	84-93

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Tillverkas i vänster- och högerutförande.



709



Ulnardeviationsortos Soft-Core, 202

Designad för att ge stöd åt MCP-lederna och rätta proximala falangerna vid indikation för ulnar drift av fingrarna. Är även effektiv som MCP-stoppsskena för att uppmuntra PIP-led flexion efter skada och/eller kirurgi. Dubbla utformade band som säkrar handen men tillåter full funktion i aktivitet. Lätt att justera och forma för att ge stöd åt volara valvet samt justera de mellan fingrarna böjbara flikarna till en bra fingerlinje. Låg vikt. **INDIKATIONER:** Reumatoid Artrit och post op MCP-leds plastik.

202 Ulnardeviationsortos Soft-Core, Hö/vä

Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large
Bredd	57-70	73-83	86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.



202





302

Air-Soft Volar Handledsortos, 302

Ortosen är konstruerad av ett formbart aluminiumstöd som är klätt med ett vadderat, ventilerande material. Det formbara aluminiumstödet är anatomiskt anpassad till underarmen. Ger stöd åt handleden i neutral position. **INDIKATIONER:** Vid carpaltunnelsyndrom som nattortos samt tendinit och artrit.

302

Air-Soft Volar Handledsortos, Hö/vä

Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large	
Bredd	57-70	73-83	86-95	

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.



125

Basic Viloortos, 125

Lättviktsortos med ställbar ram, klädd i Plastazote. Ger stöd åt fingrar, tumme och handled i en funktionell och/eller viloställning. Tillåter upp till 60° MCP-flexion och handled flexion/extension. Korsande band säkrar handleden. Denna ortos kan tvättas för hand i mild tvållösning och har löstagbara band. **INDIKATIONER:** Postoperativt/skada och vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident). Rekommenderas ej vid stark spasticitet.

125

Basic Viloortos, Hö/vä

Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large	
Bredd	57-70	73-83	86-95	

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.



Air Soft-viloortos, 325

Ortosen ger stöd för fingrar, tumme och handled i en funktionell och/eller viloställning. Aluminiumramen ger möjlighet att justera allt efter patientens framsteg vid trauma/kontrakturer. Inga verktyg eller värme behövs. Viloortosen är fodrad med ett ventilerande material. Kan tvättas i maskin i tvättpåse på låg värme. **INDIKATIONER:** Postoperativt/skada, dropphand, stramhet i fingerflexorerna och vid hudömtålighet. Rekommenderas ej vid stark spasticitet.

325	Finger/hand viloortos		
Storlek	B-Small	C-Medium	D-Large
Bredd	57-70	73-83	86-95
Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Tillverkas i vänster- och högerutförande.			

CE



Alla produkter
hittar du på:

www.mediroyal.se



Ödemhandske öppna fingertoppar, 902

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Öppna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.

INDIKATIONER: Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

902 Ödemhandske öppna fingertoppar, Hö/vä

Storlek	XS	S	M	L
Omkrets	178	203	228	255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar. Modellen finns i höger och vänster. Säljs styckvis.



Ödemhandske slutna fingertoppar, 903

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.

INDIKATIONER: Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

903 Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä

Storlek	XS	S	M	L
Omkrets	178	203	228	255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar. Modellen finns i höger och vänster och säljs styckvis.



Ödemhandske, kort handled, 904

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Handledslängd och med öppet sprund. Slutna fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras. **INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid tex akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

904 Ödemhandske kort handled, Hö/vä

Storlek	S	M	L		
Omkrets	203	228	255		

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och i fyra storlekar.



Ödemhandske slutna fingertoppar lång, 905

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna fingertoppar och lång modell (350 mm). Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras. **INDIKATIONER:** Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.

905 Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä

Storlek	L				
Omkrets	255				

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måtten hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs styckvis. Finns enbart i large.




Isotoner-handske ¾-finger, 907

Latexfria handskar med lätt kompression för lätt smärta och svullnad av handen. Mjuk, sömlös konstruktion som eliminerar tryckpunkter. Sömmarna är vända på utsidan av handsken, bort från huden. Isotonerhandsken är den enda tillgängliga handsken utan sömmar vid basen av tummen - ett känsligt område för smärta. Tillverkade av nylon och Lycra och tvåvägsriktning på materialet. Behagliga för heldagsanvändning. Öppen fingertoppsdesign för en aktiv hand. Lätt att ta av och på. Neutral färg. Säljs i par. **INDIKATIONER:** Svullnad/smärta orsakad av skada, artrit eller andra kroniska orsaker, långtidsanvändning i arbete.

907 Isotoner-handske ¾-finger, Par

Storlek	S	M	L		
Omkrets	203	228	255		

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en större storlek om måtten hamnar mellan två storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs i par. Maskintvättbara.

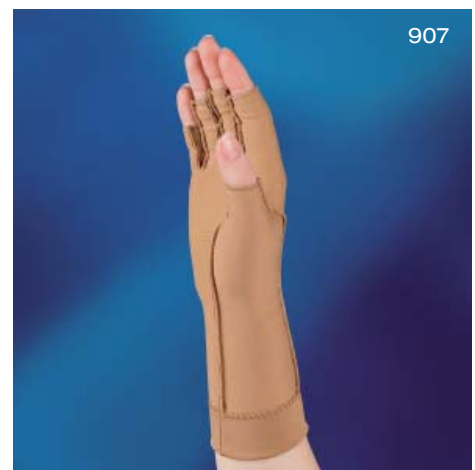



Co-Flex LF - Latexfri

Självhäftande klisterlinda på rulle som fäster mot sig själv - inte mot huden. Co-Flex erbjuder en jämn kompression. Den tappar inte passformen och förblir låst utan klips. Lindan klibbar fast även vid närvaro av fukt. Ger stöd vid repetitiv rörelseansträngning. Kan användas som ett fixerande bandage och som ett stödbandage för finger, hand, knä och fot. Säkrar och skyddar primära förband. Erbjuder även lätt tryck för kontroll av finger- och handsvullnad. Kan användas flera gånger. Lätt att applicera för att passa alla kroppskonturer. **INDIKATIONER:** Ödembehandling, stabila frakturer, överansträngning och stukningar. Lindan åstadkommer en mjuk extensionskraft i fingret samtidigt som den tillåter full flexion.

Co-Flex LF	
72100-10	CoFlex LF, Beige 25 mm, 2 meter, 10 rullar
72100-20	CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 20 rullar
72100-30	CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 30 rullar
72100-60	CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 60 rullar
72100-6	CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 6 rullar
72100-18	CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 18 rullar
72100-36	CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 36 rullar
72100-12	CoFlex LF, Beige, 75 mm, 2 meter, 12 rullar
72100-24	CoFlex LF, Beige, 75 mm, 2 meter, 24 rullar
72102-24	CoFlex, Mix, 75 mm, 2 meter, 24 rullar, 4 rullar/ vardera färg
Färg: Beige eller MixLåda (röd, mörkblå, ljusblå, lila, neonrosa och neongrön). Förpackning/storlek: Rullar om 2 meter. Ej steril.	



mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se

Living Proof
mediroyal.se