

# Mediroyal Sulor



mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)

# Sulor som hjälper



Överbelastningsskador är vanliga inom både idrott och arbete. Vid normal gång utsätts dina fötter och knän för upp till tre gånger din egen kroppsvikt. Hårda underlag och skor med dålig stötupptagning och stabilitet är en bidragande orsak till överbelastningsskador. För att optimera stötupptagningen i våra sulor har vi kombinerat olika material för att uppnå bästa effekt.



## VEP –Viskoelastisk polymer

Är ett gelé-liknade material med hög stöt- och tryckupptagning. Stötvågen från underlaget absorberas av materialet och kan då inte fortplanta sig upp genom foten. Detta leder till avsevärt lägre belastning på fot och underben.




## DeRon

Är ett viskoelastiskt skum-material med mikroporer som ger en mycket bra stötupptagning och som samtidigt låter foten andas. Detta material är laminerat på ovansidan för att ge en bra fukttransport.

## DeRon-hälkilar

Hälkilar tillverkade av VEP och DeRon. Ger bra stötupptagning och avlastning för hälen. Polymermaterialet är lätt klabbigt på undersidan vilket gör att den fäster bra i skon. Vid behov kan sulan tvättas med ljummet vatten och tvål **INDIKATIONER:** Överbelastningsskador i fot och underben, hälproblem, hälseneproblem.

MR 1210 MR 1211 MR 1212 MR 1213	DeRon-hälkilar				
	MR 1210	MR 1211	MR 1212	MR 1213	
	Small	Medium	Large	X-Large	
	33-36	37-40	41-44	45-48	

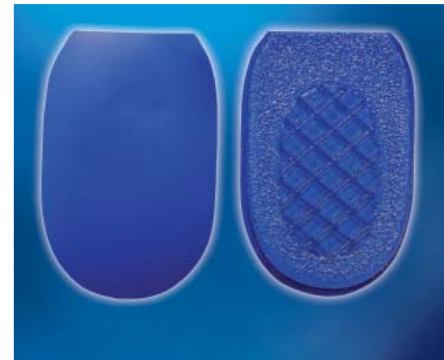

## DeRon-hälsporrekilar

Hälkilar speciellt utvecklade för att avlasta hälen vid hälsporre och plantar fasciit. Kombinationen med VEP och DeRon materialen ger en effektiv avlastning för hälen. Båda kilarna ska användas även om problemet endast finns på den ena foten. Polymermaterialet är lätt klabbigt på undersidan vilket gör att den fäster bra i skon. Vid behov kan sulan tvättas med ljummet vatten och tvål. **INDIKATIONER:** Hälsporre, plantar fasciit.

MR 1220 MR 1221 MR 1222 MR 1223	DeRon-hälsporrekilar				
	MR 1220	MR 1221	MR 1222	MR 1223	
	Small	Medium	Large	X-Large	
	33-36	37-40	41-44	45-48	






### DeRon-sulor

Helsula med tjockare hädel för maximal stötupptagning och tunnare framfot. Ytskiktet är tillverkat av DeRon. Sulan kan enkelt trimmas med sax för att få den att passa i skon. Polymermaterialet är lätt klabbigt på undersidan vilket gör att den fäster bra i skon. Vid behov kan sulan tvättas med ljummet vatten och tvål. **INDIKATIONER:** Överbelastningsskador i fot och underben, osteoartrit, osteoartros, benhinneproblem, stressfrakturer.

MR 1200 MR 1201 MR 1202 MR 1203	DeRon-sulor					
	MR 1200	MR 1201	MR 1202	MR 1203		
	Small	Medium	Large	X-Large		
	33-36	37-40	41-44	45-48		

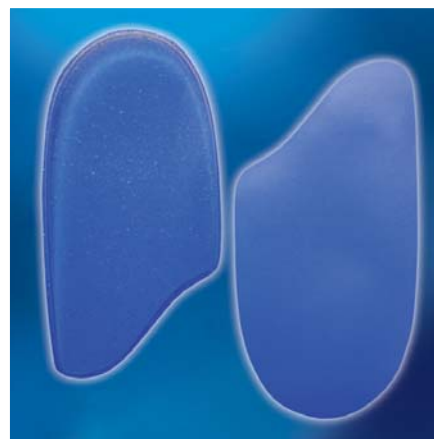

### MediRoyal halvsula

Denna halvsula är designad för att ge ett bra stöd för hälsens fettkudde genom de högre kanterna runt om kilen. De ger en skålförm som ger fettkudden ett bra stöd. Polymermaterialet är lätt klabbigt på undersidan vilket gör att den fäster bra i skon. Vid behov kan sulan tvättas med ljummet vatten och tvål. **INDIKATIONER:** Hälproblem, uttrampad fettkudde.

MR 1230 MR 1231 MR 1232 MR 1233	MediRoyal halvsula					
	MR 1230	MR 1231	MR 1232	MR 1233		
	Small	Medium	Large	X-Large		
	33-36	37-40	41-44	45-48		



### Alla produkter på [mediroyal.se](http://mediroyal.se)

Knappa in [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se) och ta del av alla våra produkter för nacke/axlar, armbåge/hand, rygg, knä, barnortoser, proteser, fotortoser, sportskydd, termoplaster och fotprodukter. Det, och mer, hittar du om du besöker vår sajt.

## MediRoyal Pronationssula

Denna sula är designad för att ge ett medialt stöd över framfot för att korrigera pronation. Hälen har ett zon med ett stötupptagande material för maximal komfort. Sulan har ett specialmaterial som yta vilket gör att T-formade pelotter kan appliceras direkt på den. Levereras med två par pelotter i två olika hårdheter. **INDIKATIONER:** Framvalvsproblem, plantar fasciit, pronation

MR 1300  
MR 1301  
MR 1302  
MR 1303  
MR 1304  
MR 1305  
MR 1306

MediRoyal halvsula

MR 1300	MR 1301	MR 1302	MR 1303	MR 1304	MR 1305	MR1306
X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large	XXX-Large
34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47




## DeRon-material

Är ett viskoelastiskt skum-material med mikroporer som ger en mycket bra stötupptagning och som samtidigt låter foten andas. Kan enkelt limmas på inlägg. Finns i 3 mm och 5 mm tjocklek. Säljs i kvadratmeter.

AC 3100  
AC 3101

DeRon-material, kvm

AC 3100	AC3101					
Blå	Grön					
3 mm	5 mm					

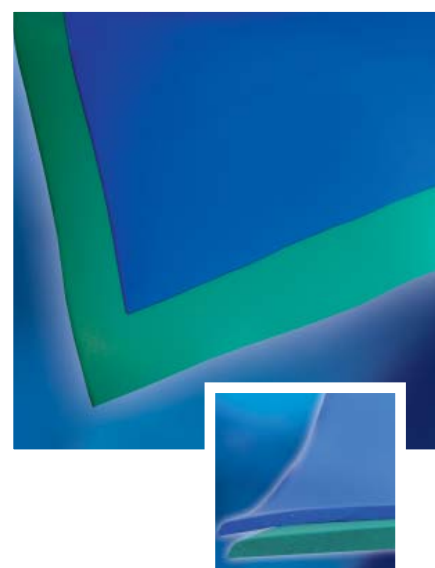


## DeRon-hälkoppar

Tillverkade av 2 mm DeRon och PE-skum. Används vid tillverkning av individuella fotbäddar och inlägg för att ge ökad stötupptagning och avlastning av hälen. Säljs i par.


EU  
05300

DeRon-hälkoppar

EU 05300						
one size						

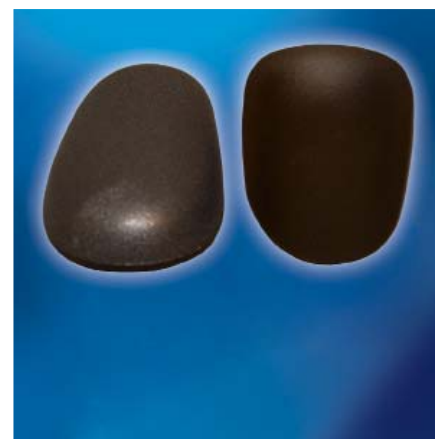

# CFI – Individuellt anpassningbara sulor

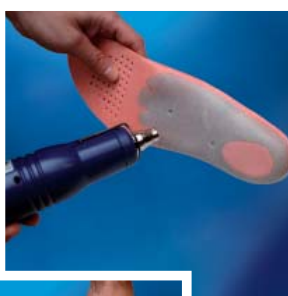

CFI är ett koncept utvecklat tillsammans med ortopedingenjör Lars Eghamn. Sulorna har en thermoformbar del som enkelt kan anpassas individuellt med hjälp av varmluft. Sulorna har också stötupptagande DeRon i mellansula samt FricStop som klädsel för maximal funktion.

## Instruktion

Börja förbereda patienten med en tjockare strumpa för att skydda mot värmen. Ta också ut den innesula som normalt finns i sportskor. Testa CFI sulan i skon så att den passar. Vid behov, klipp ned sulan för att den ska passa bättre. Använd en varmluftspistol med max 150 grader C för bästa resultat. Värm den grå delen på sulan med en varmluftspistol tills den mjuknat och är formbar. Det är oftast lättare att göra en sula i taget. För ned den varma sulan i skon och låt patienten kliva i skon. Snör den lätt och låt patienten lägga mer belastning på det benet. Det tar 1-2 minuter innan sulan härdat. Kontrollera resultatet efter formningen genom att ta ur sulan. Vid behov kan sulan klippas eller finjusteras med hjälp av varmluft. Sulan kan också byggas på med mediala eller laterala kilar vid behov.

## MediRoyal CFI inläggssula hel

Helsula som kan formas individuellt med hjälp av värme. Stötupptagande De-Ron i mellansulan och FricStop som klädsel ger en hög funktion. Perforering i framfoten för bra ventilation. **INDIKATIONER:** Fotproblem, pes valgus

MR 1320  
MR 1321  
MR 1322  
MR 1323  
MR 1324  
MR 1325  
MR 1326

MediRoyal CFI inläggssula hel

MR 1320	MR 1321	MR 1322	MR 1323	MR 1324	MR 1325	MR1326
X-small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large	XXX-Large
34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47



## MediRoyal CFI inläggssula halv

Helsula som kan formas individuellt med hjälp av värme. Stötupptagande De-Ron i mellansulan och FricStop som klädsel ger en hög funktion. **INDIKATIONER:** Fotproblem, pes valgus.

MR 1310  
MR 1311  
MR 1312

MediRoyal inläggssula halv

MR 1310	MR 1311	MR 1312			
Small	Medium	Large			
34-36	37-41	42-45			





Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)



Living Proof