

Oval 8 fingerringar



mediroyal 

Living Proof

mediroyal.se




Oval 8-fingerring är lätt att anpassa, lätt att bära utan inskränkande funktion och håller många år.

Oval 8-fingerringar stabiliserar, avlastar och korrigerar fingrarnas IP-leder för en förbättrad handfunktion. Dels genom sin unika banddesign och med både en hel och halvringstorlek i en och samma ring, beroende på vilken sida av Oval 8-ringen som först placeras på fingret. Ringarna används för att korrigera Svanhalsdeformitet, Bouttonniere och Malletfinger. Oval 8 fingerringar reducerar Lateraldeviation av fingret och avlastar vid

Triggerfinger. Oval 8-ringarna är tillverkade av 1,6 mm polypropyleneplast. Smutsavvisande och bekväm att bära vid alla temperaturer. Tillgängliga i storlekar motsvarande standardstorlekar hos vanliga ringar. Finns från storlek 2-15 i totalt 14 storlekar. Oval 8-ringen säljs separat, och/eller, i en box om 44 stycken. Oval 8-ringen säljs även i en box med 14 stycken. Ändring av ortosens vinkel justeras enkelt med varmluftspistol. ■

Två storlekar i samma ring

Varje Oval 8-fingerring är anpassad för två storlekar i en och samma ring. Designen på Oval-8-ringen är något vinklad så att den ena änden är lite längre än den andra. Det gör ringen ett halvt nummer större. Oval 8-ring storlek 6 passar till exempel både storlek 6 och storlek 6.5, beroende på vilken ände av ringen som placeras på fingret först.

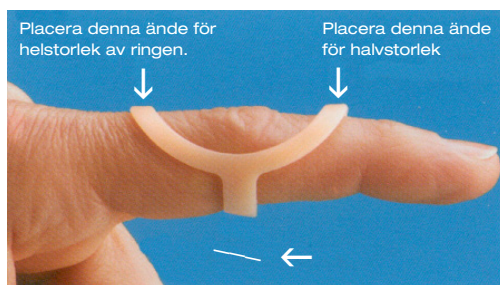

Det vinklade bandet på Oval 8-ringen gör att den rymmer två storlekar i en och samma ring.



Värm i intervaller om 3-5 sekunder för att undvika överhettning. Undvik att värma direkt mot bandet på ringen.

Justera med varmluftspistol

Ringarna är tillverkade av tunn polypropylenplast som snabbt värms upp med varmluft. T ex för att ändra ortosens vinkel. När materialet är mjukt lägg ett tryck på undersidan av bandet på varje sida av den ovala delen. Då minskar djupet på ringen. T ex för att hålla fingret i en lätt flexion i ortosen. Ringen kan justeras till 20 grader flexion och/eller hyperextension.



Svanhalsdeformitet

Hindra översträckning vid Svanhalsdeformitet. Etablerat svanhalsfinger karakteriseras av en översträckt PIP-led och flekterad DIP-led. **ORSAK:** Trauma och/eller sjukdom men vanligt vid RA. Använd Oval 8-fingerring för att förhindra hyperextension i PIP-led.



Boutonniere

Hindra kontraktur och/eller läkning av senändar vid Boutonniere deformitet. En fingerdeformitet som kännetecknas av PIP-ledsflexion och DIP-leds hyperextension. **ORSAK:** Trauma mot PIP-led öppen eller slutna skada och/eller synovit i PIP-leden. Använd Oval 8-fingerring för att hålla PIP-leden i extension.



Immobilisering

Immobilisera för avlastning och kontroll av finger. Använd två Oval 8-fingerringar för en skyddande och stödjande effekt vid till exempel stabila frakturer och vid kontroll av instabilitet i leden. **ORSAK:** Trauma mot PIP-led, öppen eller slutna skada. Använd Oval 8-fingerring för att hålla PIP-leden i extension.



Lateraldeviation

Vid lateraldeviation, ligamentskador och instabilitet i led och finger - korrigeras. Vid lateraldeviation av PIP eller DIP-leden använd Oval 8-fingerring för att sträcka fingret under dag och/eller natt. Vid instabilitet i led- och ligamentskador för att ge stöd och hindra ytterläge av fingret. **ORSAK:** Vid instabilitet i led och ligamentskador.



Malletfinger

Skydd vid Malletfinger/droppfinger. Oförmåga att sträcka i DIP-leden. Vanligtvis orsakat av trauma. Till exempel genom direktvåld mot fingertoppen genom slag vid, exempelvis, bollspel eller vid en klämskada. Använd Oval 8-fingerring för att hålla DIP-leden i extension under läkningstiden, dag och natt, i cirka sex veckor. **ORSAK:** Till exempel klämskada.



Triggerfinger

Begränsa rörelsen för att hindra Triggerfinger. Triggerfinger kännetecknas av att senan tenderar att haka upp sig i senskidemyningen vid både flexion och extension av fingret. Det kan framkalla typiska knäppningar eller låsningar. **ORSAK:** Överbelastning eller vid synoviter.



Oval 8-fingerring storleksset

Oval 8-storleksset inkluderar en av varje av de 14 storlekarna sittande på en lättöppnad nyckelring. Stabiliserar-avlastar och/eller korrigerar fingrarnas IP-leder för en förbättrad handfunktion - dels genom sin unika bandedesign och dels med både hel och halvringstorlek i en och samma ring beroende på vilken sida av Oval-8-ringen som först placeras på fingret. Tillverkad av 1,6 mm polypropylenplast. Smutsavvisande och bekväm att bära vid alla

temperaturer. Tillgänglig i storlekar motsvarande standardstorlekar hos vanliga ringar. Säljes separat och/eller i en box om 44 eller 14 stycken. Ändring av ortosens vinkel justeras enkelt med varmluftspistol. **INDIKATIONER** Korrigera svanhals-, boutonnière- och malletfinger, reducerar lateraldeviation av fingret och avlastar vid triggerfinger.

1008	Oval 8-fingerring
Storlek 2-15, 1 pack	

1008-5	Oval 8-fingerring, 5-pack
Storlek 4-10, 5 pack	

1008-S	Oval 8-fingerring storleksset
Storlek 2-15	



Oval 8-fingerring samlingsbox

Boxen innehåller 44 stycken Oval 8-fingerringar i storlekarna 2-15. Flest ringar i de mest använda storlekarna 5-10. Ficklampspennan i boxen gör det lättare att se den angivna storleken på den nedre delen av Oval 8-fingerring. Även ett häfte med information om passform, storlek och applicering av Oval 8-fingerring medföljer boxen. Ni hittar även instruktioner om hur ni går till väga vid justering med hjälp av varmluftspistol i samlingsboxen.

1008-K	Oval 8-fingerring samlingsbox
Storlek 2-15	
Boxen innehåller: Totalt 44 Oval 8-fingerringar:	
<ul style="list-style-type: none"> 1 st fingerring storlek två 2 st fingerringar storlek tre 2 st fingerringar storlek fyra 4 st fingerringar storlek fem 5 st fingerringar storlek sex 5 st fingerringar storlek sju 5 st fingerringar storlek åtta 5 st fingerringar storlek nio 4 st fingerringar storlek tio 3 st fingerringar storlek elva 3 st fingerringar storlek tolv 2 st fingerringar storlek tretton 2 st fingerringar storlek fjorton 1 st fingerring storlek femton 	
Ficklampspenna Informationshäfte	

mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se

Living Proof
mediroyal.se