

# TRANSITION POST-OP ARMBÅGE

ARTIKELNUMMER EB5000



## 1. Generell information

Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning.

## 2. Indikationer

Produkten har designats för att användas för att immobilisera armbågen post-trauma.

## 3. Kontraindikationer

Instabila frakturer skall inte behandlas med denna ortos.

## 4. Förberedelse för applicering

För att välja rätt storlek enligt mått-tabellen. Måttet tas från centrum armbågsled till centrum av handleden.


Small 15-20 cm

Medium 20-25 cm


Large över 25 cm

## 5. Justering


1. För att justera leden, vrid på det genomskinliga ledskyddet till det läge där extension eller flexionsstoppet är placerat.

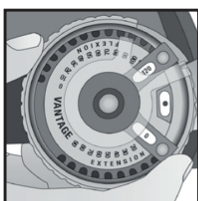



2. Dra ut ledstoppet från leden

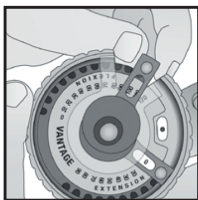


3. Roter ledstoppet till den position som du vill uppnå.

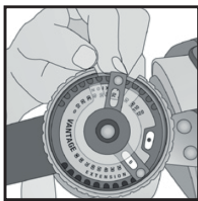


4. Tryck in ledstoppet och kontrollera att det fastnat

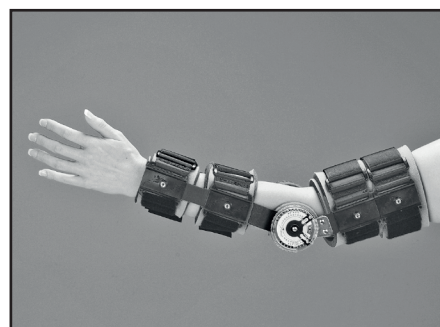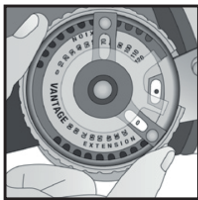


5. Roter ledstoppet över till andra sidan. Upprepa samma procedur för den sidan.

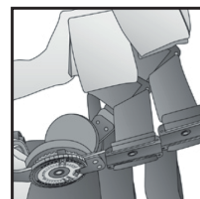

6. Öppna ortosens kardborrband. Justera ledarmen vid behov med ett skränkjärn.

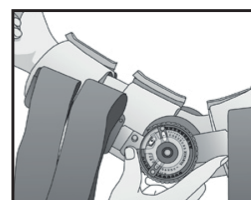

7. Applicera ortosen och stäng kardborrbanden. Vi behov justera dess längd. Polstringen kan också enkelt justeras.

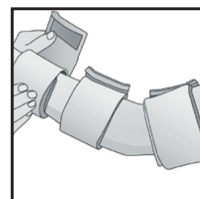

## 6. Avlägsnande av ortosen

Öppna alla kardborrband och ta av ortosen.

## 7. Skötsel och försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar att polstringen tvättas en gång i veckan. Handtvätt med mild tvättmedel rekommenderas och låt lufttorka. Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling.

För mer information besök [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)



Mediroyal Nordic AB

Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)

[facebook.com/MediroyalNordic](https://facebook.com/MediroyalNordic)