

# ELASTISKT ÅTTABANDAGE

ARTIKELNUMMER EU5001



## 1. Generell information

Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på baksidan av den vita etiketten på produkten.

## 2. Indikationer

Produkten har designats för att användas vid fotledsinstabilitet.

## 3. Kontraindikationer

Detta bandage ger kompression över fotleden och skall inte användas av patienter som har cirkulationsbesvär och svullnar i fötterna.

## 4. Förberedelse för applicering

Välj rätt storlek på förpackningen efter din skostorlek.

## 5. Applicering

Placera en av öglorna över hälen enligt bilden. Linda sedan runt fotleden ett antal gånger med jämn kompression. Fäst öglan antingen på hälen igen eller runt framfoten.



## 6. Avlägsnande av ortosen

Linda av bandet.

## 7. Skötsel och försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionen på den vita etiketten på produkten.

Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produktens materialinnehåll som finns på den vita artikeletiketten på produkten.

För mer information besök [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)



Mediroyal Nordic AB  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)  
[facebook.com/Mediroyalnordic](https://facebook.com/Mediroyalnordic)